
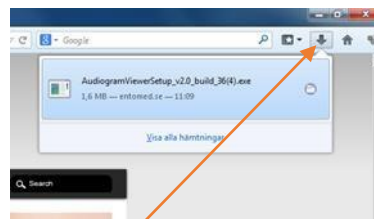


## Entomed Audiogram Viewer – instruktion för nedladdning och installation

1, klicka på länken för att ladda ner AudiogramViewer


2, nedanstående dialogruta öppnas

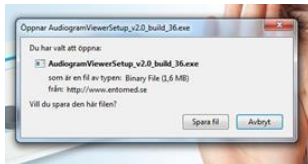

3, klicka *Spara fil* och nedladdningen påbörjas

4, för att se den nedladdade installationsfilen – se bilden till höger - klicka på pilen uppe till höger, för att öppna den.


Notera! Placering och utseende på denna knapp, varierar beroende på vilken web-brower du använder.

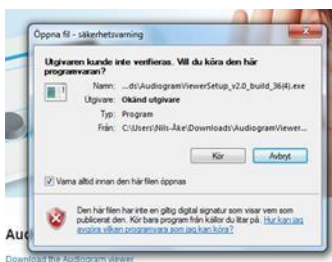


5, dialogrutan till vänster – säkerhetsvarning – öppnas för att uppmärksamma att man av misstag inte installerar något oavsiktligt.

6, av texten framgår att det i detta fall är installationsfilen för att kunna installera Entomed AudiogramViewer

7, klicka på *Kör* för att köra installationsprogrammet för Entomed AudiogramViewer

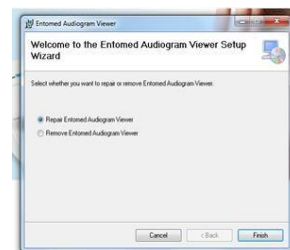


8, dialogrutan till höger visas som vägledning och välj lämpligt alternativ och klicka på *Finish*. (Kan vara bra att veta att alternativen *reparera* eller *ta bort/avinstallera* programmet, som visas i detta exempel, visas då programmet redan är installerat)

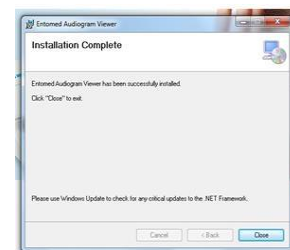

9, nedanstående dialogruta – återigen en säkerhetsvarning – öppnas för att

uppmärksamma att man av misstag inte installerar något oönskat program oavsiktligt.

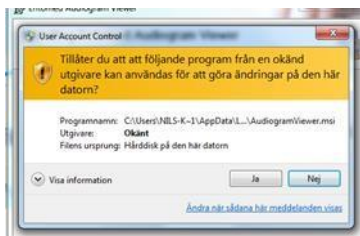

10, av texten framgår att det i detta fall är Entomed AudiogramViewer


11, klicka på *Ja* för att installera Entomed AudiogramViewer



12, så snart installationen är korrekt slutförd, klicka *Close*

13, för att starta programmet, gå till startknappen nere till vänster på bildskärmen, välj *Alla* program och leta upp mappen *Entomed*, öppna den genom att vänsterklicka på *Entomed Audiogram Viewer*, se bilden till vänster.

14, Programmets funktioner styrs utifrån de tre flikarna och knappraden högst upp.

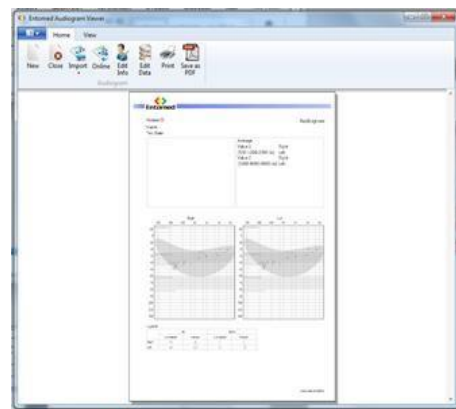

15, för inkoppling av audiometern, se separat produktblad, alternativt audiometers bruksanvisning.

Lycka till!